



ANEXO 2

ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION	No DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLES	ACTIVIDADES
3.1.1 EDIFICIOS	MUROS PUERTAS Y ENCHAPES	6 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	2ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Detección de fisuras, deterioro de la pintura, hacer resanes y aplicar pinturas, cambiar enchapes y puertas deterioradas.
	VIGAS Y COLUMNAS	Hospital	sin	Anual	Febrero	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Inspeccion,detección de fallas y reparación de daños.
	CUBIERTAS Y CIELO RASO	Hospital	sin	Semestral	Abril; Octubre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Inspección y reparación de daños.
	CANALES Y DESAGUES	Hospital	sin	Semestral	Junio; Diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Inspección y reparación de daños.
3.1.2 INSTALACIONES FISICAS	MALLA DE ENCERRAMIENTO	Periferia del hospital	sin	Cuatrimestral	Mayo; Agosto; Diciembre	OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS	Aplicar mata maleza limpiar malla.
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	Tanque de Agua	Sin	Semestral	Junio Diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Lavado y aplicación de hipoclorito para su enjuague.
	REDES HIDRAULICAS (tuberías y accesorios)	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	1ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, revisión de accesorios, reparación de fisuras y detección de goteras.



ANEXO 2

3.1.3 SISTEMAS DE REDES	REDES ELECTRICAS (baja tensión: lámparas fluorescentes, alumbrado publico plafones, interruptores, tomas de corriente, reflectores entre otras)	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	2ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, seguridad electrica, cambio de tornilleria, revisión general y limpieza.
	REDES SANITARIAS RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO (lavamanos, sanitarios, duchas, lavaplatos, piletas, albercas)	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	3ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, mantenimiento, cambio de herrajes, reparación de obstrucciones en cañerías y eliminación de malos olores.
3.1.4 AREAS ADYACENTES	ZONAS VERDES HOSPITAL Y JARDINES	Hospital	Sin	Bimestral	Febrero; Abril; Junio; Agosto; Octubre; Diciembre	FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Poda de pasto, limpieza de escombros y poda de arboles. Actividades de jardineria
3.2.1.1 PLANTA ELECTRICAS	PLANTA ELECTRICA	Área Mantenimiento	15200	Mensual	4ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, limpieza general, engrase, cambio de aceites, pruebas con carga, análisis de la transferencia, revisión de rutina.
	LAVADORA INDUSTRIAL	Zona de Lavandería	15203	Cuatrimestral	ABRIL AGOSTO DICIEMBRE	PROVEEDOR ESPECIALIZADO	Revisión preventiva, por cuanto se encuentra en garantía



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

3.2.1.2EQUIPOS DE LAVANDERIA Y COCINA NEVERAS	LAVADORAS, EXTRACTOR DE OLORES, MESAS DE ACERO INOXIDABLE, FILTROS DE AGUA	Zona de Lavandería Cocina Farmacia	Varios	Trimestral	Abril; Julio; Octubre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento: descarte de fugas, limpieza de quemadores, revision de las lavadoras, lubricacion y ajuste
3.2.1.3BOMBAS DE AGUA Y CALDERAS	EQUIPO DE BOMBEOS	Área Mantenimiento	15203	Mensual	4ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Limpieza y calibración.
3.2.1.4EQUIPOS DE REFRIGERACION	AIRES ACONDICIONADOS	Varios	varios	Bimestral	Enero; Marzo; Mayo; Julio; Septiembre; Noviembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Revisión eléctrica y limpieza general a filtros y unidades interiores y exteriores.
	VENTILADORES	Varios	Varios	Trimestral	Marzo; Junio; Septiembre;	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Limpieza y lubricación.
	FILTROS DE AGUA	Varios	Varios	Trimestral	Marzo; Junio; Septiembre; Diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Limpieza y lubricación.



ANEXO 2

<p>3.2.1.5 SERVICIOS DE APOYO</p>	<p>GUADAÑADORA, MAQUINA DE COSER, HERRAMIENTAS DE ASEO, TALLER Y EXTRARCTOR DE OLORES</p>	<p>Granja Mantenimiento Cocina</p>	<p>varios</p>	<p>Semestral</p>	<p>junio diciembre</p>	<p>AUXILIAR MANTENIMIENTO</p>	<p>verificar funcionamiento equipo de bombeo, guadañadora, herramienta de mano, lubricacion y ajuste</p>
<p>3.2.1.6 PARQUE AUTOMOTOR</p>	<p>TOYOTA HILLUX VANS HYNDAY</p>	<p>vehiculos</p>	<p>OTC 072 O CJ 509</p>	<p>CADA 5000K O CADA 6 MESES</p>		<p>FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS</p>	<p>Cada 5000 KM (cambio de aceite, filtros de aceite, filtros de combustible, filtros de aire entre otros)</p>
<p>3.2.1.7 EQUIPOS DE SEGURIDAD</p>	<p>AMBULANCIA TAB RENAULT 4X2, AMBULANCIA TAB NISSAN</p>	<p>vehiculos</p>	<p>ODU 873</p>	<p>CADA 5000 K M O CADA 6 MESES</p>		<p>FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS</p>	<p>Cada 5000 KM (balanceo, cambio de pastillas de frenos, revisión suspensión).</p>
<p>3.4 MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIA</p>	<p>MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL</p>	<p>Todas la ÁREAS</p>	<p>Varios</p>	<p>semestral</p>	<p>Abril Octubre</p>	<p>AUXILIAR MANTENIMIENTO</p>	<p>Verificar el estado de los muebles: rodachines, tapones, cojineria, pintura, eliminacion de oxido, cajones, cambios de piezas.</p>



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

3.5.1EQUIPOS DE COMPUTO	COMPUTADORES E IMPRESORAS	Todas la ÁREAS	Varios	Mensual	1ª Semana	FUNCIONARIO DE SISTEMAS	Desensamble y ensamble de equipos, limpieza de componentes, verificación de dispositivos de enfriamiento, instalación, actualización de aplicativos y antivirus.
3.5.3 CENTRAL DE COMUNICACIONES	PLANTA TELEFONICA Y TELEFONOS, AMPLIFICADOR DE VOZ	Todas la ÁREAS	Varios	Mensual	4ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, limpieza general revisión de cableado y revisión de tonos.
	SISTEMA DE MONITOREO VISUAL	Todas la ÁREAS	Varios	Cuatrimestral	febrero Junio Octubre	PROVEEDOR ESPECIALIZADO	Revisión del equipo DVR (Grabadora de Vídeo Digital) verificando que esté funcionando de forma correcta y que la grabación esté libre de distorsión.
	RADIO BASE	Atención al Usuario	152012	Semestral	Junio; Diciembre	FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Verificación del funcionamiento y arreglos de fallas
3.5.3EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO PRODUCCION Y TRANSCRIPCION DE INFORMACION	IMPRESORA FS-2020 MULTIFUNCIONAL BH-215 MINOLTA, KONICA MINOLTA BH-367 KYOCERA KYOCERA FS2020D	Oficina de Recursos Humanos Ventanilla Única Facturación Atención al Usuario		Trimestral	Enero; Abril; Julio; Octubre	PROVEEDOR ESPECIALIZADO	Mantenimiento, lubricacion de las unidades, limpieza externa e interna, ajustes y chequeo en general



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

BIOMEDICOS	DESFIBRILADOR	TAB-078	17E00007384	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza general, revisión de circuito eléctrico, verificación de controles y pantalla, revisión de batería, revisión de carga y descarga, impresora, palas, conversión de palas pediátricas si aplica, modos de desfibrilación y cardioversión, ajuste de selección de potencia, revisión de cable de poder y cable ecg, conector de electrodos si aplica, realizar prueba de usuario si aplica.
	FLUJÓMETRO	TAB-078	12341203	TRIMESTRAL	ENERO, ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Revisión de acoples, Revisión de empaques y fuga.
	FONENDOSCOPIO	TAB-078	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	ENERO, ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, campana. Membrana, arco y latiguillo, cambio de accesorios a necesidad.
	FONENDOSCOPIO	TAB-078	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, campana. Membrana, arco y latiguillo, cambio de accesorios a necesidad.
	MONITOR DE SIGNOS VITALES	TAB-078	J42000A00016	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Inspección del cable de poder. Verificar conexión a red eléctrica. Revisión y comprobación de funcionamiento y estado física de accesorios: Cable de ECG si aplica, Sensor de SPO2, Mangueras y brazaletes. Verificar funcionamiento de todos los parámetros del equipo. Verificar alarmas sonoras y visuales. Revisión de programación y hacer ajustes en caso necesario. Limpieza interna y externa del equipo con sus accesorios. Revisión de carga de baterías.
	REGULADOR DE OXÍGENO	TAB-078	16011830	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Revisión de acoples, Revisión de empaques y fuga.



ANEXO 2

BIOMICOS	REGULADOR DE OXÍGENO	TAB-078	20160402973	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Revisión de acoples, Revisión de empaques y fuga.
	SUCCIONADOR	TAB-078	SU1410000277	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Inspección cable de poder y conexión a red eléctrica. Verificación funcionamiento sistema de vacío. Verificar vacío. Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. Ajuste de mangueras. Verificar hermeticidad del frasco. Lubricación de partes móviles. Limpieza partes internas, ajuste de válvulas unidireccionales (flappers) . Limpieza partes externas. Verificar rango de vacío (seg/mmHg).
	TENSIÓMETRO	TAB-078	17006007	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora. Limpieza y lubricación de balín cheque pera de insuflación. Limpieza de velero. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de calibración. Ajuste de mangueras si es necesario.
	TENSIÓMETRO	TAB-078	412610	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora. Limpieza y lubricación de balín cheque pera de insuflación. Limpieza de velero. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de calibración. Ajuste de mangueras si es necesario.
	DESFIBRILADOR	TAB-873	14D0814631	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza general, revisión de circuito eléctrico, verificación de controles y pantalla, revisión de batería, revisión de carga y descarga, impresora, palas, conversión de palas pediátricas si aplica, modos de desfibrilación y cardioversión, ajuste de selección de potencia, revisión de cable de poder y cable ecg, conector de electrodos si aplica, realizar prueba de usuario si aplica.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

BIMEDICOS	FLUJÓMETRO	TAB-873	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Revisión de acoples, Revisión de empaques y fuga.
	FONENDOSCOPIO	TAB-873	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, campana. Membrana, arco y latiguillo, cambio de accesorios a necesidad.
	FONENDOSCOPIO	TAB-873	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, campana. Membrana, arco y latiguillo, cambio de accesorios a necesidad.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

EQUIPOS BIOMEDICOS	MONITOR DE SIGNOS VITAL	TAB-873	M14808523008 5	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Inspección del cable de poder. Verificar conexión a red eléctrica. Revisión y comprobación de funcionamiento y estado física de accesorios: Cable de ECG si aplica, Sensor de SPO2, Mangueras y brazaletes. Verificar funcionamiento de todos los parámetros del equipo. Verificar alarmas sonoras y visuales. Revisión de programación y hacer ajustes en caso necesario. Limpieza interna y externa del equipo con sus accesorios. Revisión de carga de baterías.
	REGULADOR DE OXÍGENO	TAB-873	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Revisión de acoples, Revisión de empaques y fuga.
	REGULADOR DE OXÍGENO	TAB-873	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Revisión de acoples, Revisión de empaques y fuga.
	SUCCIONADOR	TAB-873	003	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Inspección cable de poder y conexión a red eléctrica. Verificación funcionamiento sistema de vacío. Verificar vacío. Revisión
	TENSÍOMETRO	TAB-873	980067	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Limpieza de velero. Prueba de



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

BIOMEDICOS	TENSÍOMETRO	TAB-873	988110	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Limpieza de velero. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de calibración. Ajuste de mangueras si es
	FONENDOSCOPIO	LARGA ESTANCIA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, campana. Membrana, arco y latiguillo, cambio de accesorios a necesidad.
	GLUCÓMETRO	LARGA ESTANCIA	A101354F3847	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Revisión de batería. Limpieza general
	PESA ADULTO	LARGA ESTANCIA	1620001928/15 329	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza de partes mecánicas internas, revisión de ajuste a cero y constante de elongación de resorte o sistema de basculamiento (tallmetro), revisión de disco o barra de medición, revisión de nivel.
	PULSOXÍMETRO	LARGA ESTANCIA	316036- M13900860032	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Verificar estado de la batería. Revisión y comprobación de funcionamiento y estado físico. Verificar de funcionamiento de todos los parámetros del equipo. Verificar alarmas sonoras y visuales. Limpieza interna y externa Limpieza de contactos. Realizar pruebas de
	TENSÍOMETRO	LARGA ESTANCIA	718748	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Limpieza de velero. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de calibración. Ajuste de mangueras si es necesario.
	TERMOHIGRÓMETRO	LARGA ESTANCIA	152013	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Revisión de batería y estado de display. Limpieza general.
	FONENDOSCOPIO	UAICA	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, campana. Membrana, arco y latiguillo, cambio de accesorios a necesidad.
	GLUCÓMETRO	UAICA	A101354F2429	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Revisión de batería. Limpieza general
	PESA ADULTO	UAICA	350006676	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza de partes mecánicas internas, revisión de ajuste a cero y constante de elongación de resorte o sistema de basculamiento (tallmetro), revisión de disco o barra de medición, revisión de nivel.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

BIOMEDICOS	PULSOXÍMETRO	UAICA	316036- M15550267006	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Verificar estado de la batería. Revisión y comprobación de funcionamiento y estado físico. Verificar de funcionamiento de todos los parámetros del equipo. Verificar alarmas sonoras y visuales.
	TENSÍOMETRO	UAICA	130523205946	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Limpieza de velero. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de calibración. Ajuste de mangueras si es necesario.
	TERMOHIGRÓMETRO	UAICA	152010	TRIMESTRAL	ENERO ABRIL, JULIO, OCTUBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Revisión de batería y estado de display. Limpieza general.
	BÁSCULA	CONSULTORIO AU	3500044561	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza de partes mecánicas internas, revisión de ajuste a cero y constante de elongación de resorte o sistema de basculamiento (tallmetro), revisión de disco o barra de medición, revisión de nivel.
	FONENDOSCOPIO	CONSULTORIO AU	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, campana. Membrana, arco y latiguillo, cambio de accesorios a necesidad.
	TENSÍOMETRO	CONSULTORIO AU	0304741198	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Limpieza de velero. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de calibración. Ajuste de mangueras si es necesario.
	TENSÍOMETRO	CONSULTORIO AU	130610221904	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Limpieza de velero. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de calibración. Ajuste de mangueras si es necesario.
	BÁSCULA	CONSULTORIO 1	16200013807	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza de partes mecánicas internas, revisión de ajuste a cero y constante de elongación de resorte o sistema de basculamiento (tallmetro), revisión de disco o barra de medición, revisión de
	EQUIPO DE ÓRGANOS	CONSULTORIO 1	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Inspección de baterías, cambio a necesidad. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa.
	FONENDOSCOPIO	CONSULTORIO 1	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, campana. Membrana, arco y latiguillo, cambio de accesorios a necesidad.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

BIOMEDICOS	TENSÍOMETRO	CONSULTORIO 1	490755	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Limpieza de velero. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de calibración. Ajuste de mangueras si es necesario.
	EQUIPO DE ÓRGANOS	CONSULTORIO 2	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Inspección de baterías, cambio a necesidad. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa.
	FONENDOSCOPIO	CONSULTORIO 2	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, campana. Membrana, arco y latiguillo, cambio de accesorios a necesidad.
	TENSÍOMETRO	CONSULTORIO 2	944314	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Limpieza de velero. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de calibración. Ajuste de mangueras si es necesario.
	BÁSCULA	CONSULTORIO 2	1620001590	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza de partes mecánicas internas, revisión de ajuste a cero y constante de elongación de resorte o sistema de basculamiento (tallmetro), revisión de disco o barra de medición, revisión de nivel.
	EQUIPO DE ÓRGANOS	CONSULTORIO 3	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Inspección de baterías, cambio a necesidad. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa.
	FONENDOSCOPIO	CONSULTORIO 3	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, campana. Membrana, arco y latiguillo, cambio de accesorios a necesidad.
	TENSÍOMETRO	CONSULTORIO 3	521687	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Limpieza de velero. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de calibración. Ajuste de mangueras si es necesario.
	BÁSCULA	CONSULTORIO 4	1620001591	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza de partes mecánicas internas, revisión de ajuste a cero y constante de elongación de resorte o sistema de basculamiento (tallmetro), revisión de disco o barra de medición, revisión de nivel.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

	EQUIPO DE ÓRGANOS	CONSULTORIO 4	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Inspección de baterías, cambio a necesidad. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa.
	FONENDOSCOPIO	CONSULTORIO 4	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, campana. Membrana, arco y latiguillo, cambio de accesorios a necesidad.
	TENSÍOMETRO	CONSULTORIO 4	520230	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Limpieza de velero. Prueba de fugas al brazalet. Verificación de calibración. Ajuste de mangueras si es necesario.



ANEXO 2

BIOMICOS	BÁSCULA	CONSULTORIO 6	1600014547	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza de partes mecánicas internas, revisión de ajuste a cero y constante de elongación de resorte o sistema de basculamiento (talimetro), revisión de disco o barra de medición, revisión de nivel.
	EQUIPO DE ÓRGANOS	CONSULTORIO 6	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Inspección de baterías, cambio a necesidad. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa.
	FONENDOSCOPIO	CONSULTORIO 6	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, campana. Membrana, arco y latiguillo, cambio de accesorios a necesidad.
	TENSIÓMETRO	CONSULTORIO 6	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Limpieza de velero. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de calibración. Ajuste de mangueras si es necesario.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

BOMBA DE INFUSIÓN	MUJERES	50190310	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza general, Revisión de control de encendido y apagado (sistema automático), Revisión de circuitos y conexiones eléctricas.
FONENDOSCOPIO	MUJERES	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, campana. Membrana, arco y latiguillo, cambio de accesorios a necesidad.
GLUCÓMETRO	MUJERES	A101198F3851	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Revisión de batería. Limpieza general
NEBULIZADOR	MUJERES	1621202094	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza de partes mecánicas internas, revisión de ajuste a cero y constante de elongación de resorte, revisión de disco de medición, revisión de nivel, limpieza general.
PULSOXÍMETRO	MUJERES	3160336M1390 0860043/15321 4	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Verificar estado de la batería. Revisión y comprobación de funcionamiento y estado físico. Verificar de funcionamiento de todos los parámetros del equipo. Verificar alarmas sonoras y visuales. Limpieza interna y externa Limpieza de contactos. Realizar pruebas de funcionamiento con simulador de paciente.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

BIOMEDICOS	TENSÍOMETRO	MUJERES	708949	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Limpieza de velero. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de calibración. Ajuste de mangueras si es
	TERMOHIGRÓMETRO	MUJERES	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Revisión de batería y estado de display. Limpieza general.
	BOMBA DE INFUSIÓN	HOMBRES	50190304	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza general, Revisión de control de encendido y apagado (sistema automático), Revisión de circuitos y conexiones eléctricas
	FONENDOSCOPIO	HOMBRES	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, campana. Membrana, arco y latiguillo, cambio de accesorios a necesidad.
	GLUCÓMETRO	HOMBRES	A101198F3842	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Revisión de batería. Limpieza general



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

BIOMEDICOS	PESA ADULTO	HOMBRES	16000013842	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza de partes mecánicas internas, revisión de ajuste a cero y constante de elongación de resorte o sistema de basculamiento (tallmetro), revisión de disco o barra de medición, revisión de nivel.
	PULSOXÍMETRO	HOMBRES	31603346M139 00860041	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Verificar estado de la batería. Revisión y comprobación de funcionamiento y estado físico. Verificar de funcionamiento de todos los parámetros del equipo. Verificar alarmas sonoras y visuales.
	TENSÍOMETRO	HOMBRES	708858	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Limpieza de velero. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de calibración. Ajuste de mangueras si es necesario.
	TERMOHIGRÓMETRO	HOMBRES	05176	TRIMESTRAL	FEBRERO, MAYO.AGOSTO, NOVIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Revisión de batería y estado de display. Limpieza general.
	BOMBA DE INFUSIÓN	AGUDOS	50190463	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza general, Revisión de control de encendido y apagado (sistema automático), Revisión de circuitos y conexiones eléctricas.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

BIOMEDICOS	BOMBA DE INFUSIÓN	AGUDOS	601016010090	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza general, Revisión de control de encendido y apagado (sistema automático), Revisión de circuitos y conexiones eléctricas.
	BOMBA DE INFUSIÓN	AGUDOS	601016010090	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza general, Revisión de control de encendido y apagado (sistema automático), Revisión de circuitos y conexiones eléctricas.
	DEFIBRILADOR	AGUDOS	00219CM1869	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza general, revisión de circuito eléctrico, verificación de controles y pantalla, revisión de batería, revisión de carga y descarga, impresora, palas, conversión de palas pediátricas si aplica, modos de desfibrilación y cardioversión, ajuste de selección de potencia, revisión de cable
	EQUIPO DE ÓRGANOS	AGUDOS	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Inspección de baterías, cambio a necesidad. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa.
	FONENDOSCOPIO	AGUDOS	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, campana. Membrana, arco y latiguillo, cambio de accesorios a necesidad.
	FONENDOSCOPIO	AGUDOS	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, campana. Membrana, arco y latiguillo, cambio de accesorios a necesidad.
	GLUCÓMETRO	AGUDOS	A101354F4483	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Revisión de batería. Limpieza general



ANEXO 2

BIOMEDICOS	LARINGOSCOPIO	AGUDOS	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento de bombillos. Verificación carga de baterías y reemplazarla a necesidad. Limpieza de contactos eléctricos. Limpieza y desinfección general con detergente enzimático no corrosivo. Ajuste protector de bombillo.
	MONITOR DE SIGNOS VITAL	AGUDOS	M17313160011	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Inspección del cable de poder. Verificar conexión a red eléctrica. Revisión y comprobación de funcionamiento y estado física de accesorios: Cable de ECG si aplica, Sensor de SPO2, Mangueras y brazaletes. Verificar funcionamiento de todos los parámetros del equipo. Verificar alarmas sonoras y visuales. Revisión de programación y hacer ajustes en caso necesario. Limpieza interna y externa del equipo con sus accesorios. Revisión de carga de baterías.
	MONITOR DE SIGNOS VITAL	AGUDOS	M1590004020071	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Inspección del cable de poder. Verificar conexión a red eléctrica. Revisión y comprobación de funcionamiento y estado física de accesorios: Cable de ECG si aplica, Sensor de SPO2, Mangueras y brazaletes. Verificar funcionamiento de todos los parámetros del equipo. Verificar alarmas sonoras y visuales. Revisión de programación y hacer ajustes en caso necesario. Limpieza interna y externa del equipo con sus accesorios. Revisión de carga de baterías.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

	NEBULIZADOR	AGUDOS	D4002273	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza de partes mecánicas internas, revisión de ajuste a cero y constante de elongación de resorte, revisión de disco de medición, revisión de nivel, limpieza general.
	PESA ADULTO	AGUDOS	1620001526	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza de partes mecánicas internas, revisión de ajuste a cero y constante de elongación de resorte o sistema de basculamiento (tallmetro), revisión de disco o barra de medición, revisión de nivel.
	PULSOXÍMETRO	AGUDOS	14807110033	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Verificar estado de la batería. Revisión y comprobación de funcionamiento y estado físico. Verificar de funcionamiento de todos los parámetros del equipo. Verificar alarmas sonoras y visuales. Limpieza interna y externa Limpieza de contactos. Realizar pruebas de funcionamiento con simulador de paciente.
	SUCCIONADOR	AGUDOS	6980001881	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Inspección cable de poder y conexión a red eléctrica. Verificación funcionamiento sistema de vacío. Verificar vacío. Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. Ajuste de mangueras. Verificar hermeticidad del frasco. Lubricación de partes móviles. Limpieza partes internas, ajuste de válvulas unidireccionales (flappers). Limpieza partes



ANEXO 2

BIOMEDICOS	REGULADOR DE OXÍGENO	AGUDOS	124372	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Revisión de acoples, Revisión de empaques y fuga.
	TENSÍOMETRO	AGUDOS	140221095942	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora. Limpieza y lubricación de balín cheque pera de insuflación. Limpieza de velero. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de calibración. Ajuste de mangueras si es necesario.
	TERMOHIGRÓMETRO	AGUDOS	153230	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Revisión de batería y estado de display. Limpieza general.
	TERMOHIGRÓMETRO	AGUDOS	05178	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Revisión de batería y estado de display. Limpieza general.
	MONITOR DE SIGNOS VITALES	ALMACÉN	M009E008752	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Inspección del cable de poder. Verificar conexión a red eléctrica. Revisión y comprobación de funcionamiento y estado físico de accesorios Cable de ECG si aplica. Cable de SPO2. Conexión y
	SUCCIONADOR	ALMACÉN	16040061	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento sistema de vacío. Verificar vacío. Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. Ajuste de mangueras. Verificar hermeticidad del frasco. Lubricación de partes móviles. Limpieza partes internas. ajuste de válvulas unidireccionales (flappers). Limpieza partes
	BOMBA DE INFUSIÓN	PROCEDIMIENTOS	5019040	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza general, Revisión de control de encendido y apagado (sistema automático), Revisión de circuitos y conexiones eléctricas.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

BIOMEDICOS	DESFIBRILADOR	PROCEDIMIENTOS	90703CM1378	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza general, revisión de circuito eléctrico, verificación de controles y pantalla, revisión de batería, revisión de carga y descarga, impresora, palas, conversión de palas pediátricas si aplica, modos de desfibrilación y cardioversión, ajuste de selección de potencia, revisión de cable de poder y cable ecg, conector de electrodos si aplica, realizar prueba de usuario si aplica.
	ELECTROCARDIOGRAFO	PROCEDIMIENTOS	1070.003083	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza general, revisión de circuito eléctrico, verificación de controles y pantalla, revisión de batería, revisión de carga y descarga, impresora, palas, conversión de palas pediátricas si aplica, modos de desfibrilación y cardioversión, ajuste de selección de potencia, revisión de cable de poder y cable ecg, conector de electrodos si aplica, realizar prueba de usuario si aplica.
	EQUIPO DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA	PROCEDIMIENTOS	12749	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza general, revisión de circuito eléctrico, verificación de controles y pantalla, revisión de batería, revisión de carga y descarga, palas ajuste de selección de potencia, revisión de cable de poder y
	FONENDOSCOPIO	PROCEDIMIENTOS	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, campana. Membrana, arco y latiguillo, cambio de accesorios a necesidad.
	LARINGOSCOPIO	PROCEDIMIENTOS	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento de bombillos. Verificación carga de baterías y reemplazarla a necesidad. Limpieza de contactos eléctricos. Limpieza y desinfección general con detergente enzimático no corrosivo. Ajuste protector
	MONITOR DE SIGNOS VITAL	PROCEDIMIENTOS	110249061	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Inspección del cable de poder. Verificar conexión a red eléctrica. Revisión y comprobación de funcionamiento y estado física de accesorios: Cable de ECG si aplica, Sensor de SPO2, Mangueras y



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

BIOMEDICOS	MONITOR DE SIGNOS VITAL	PROCEDIMIENTOS	14808530053	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Inspección del cable de poder. Verificar conexión a red eléctrica. Revisión y comprobación de funcionamiento y estado física de accesorios: Cable de ECG si aplica, Sensor de SPO2, Mangueras y
	NEBULIZADOR	PROCEDIMIENTOS	D4002104	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, limpieza de partes mecánicas internas, revisión de ajuste a cero y constante de elongación de resorte, revisión de disco de medición, revisión de nivel, limpieza general.
	SUCCIONADOR	PROCEDIMIENTOS	.011500009848	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Inspección cable de poder y conexión a red eléctrica. Verificación funcionamiento sistema de vacío. Verificar vacío. Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. Ajuste de mangueras. Verificar hermeticidad del frasco. Lubricación de partes móviles. Limpieza
	TERMOHIGRÓMETRO	PROCEDIMIENTOS	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Revisión de batería y estado de display. Limpieza general.
	REGULADOR DE OXÍGENO	PROCEDIMIENTOS	124372	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Revisión de acoples, Revisión de empaques y fuga.
	MASAJEADOR	T OCUPACIONAL	NO REGISTRA	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Verificar funcionamiento. Verificar carga de baterías, prueba de funcionamiento.
	T.E.N.S.	T OCUPACIONAL	18011	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE, DICIEMBRE	EQUIPO BIOMEDICO	Revisión de estado físico, revisión de condiciones eléctricas, revisión de estado de los electrodos y cables, revisión de sistema eléctrico, controles e indicadores, verificación de estado de cable AC y Switch, limpieza general
	EQUIPO DE ENCEFALOGRAFÍA	ELECTRODIAGNÓSTICO	1509PX3704020	SEMESTRAL	JUNIO	EQUIPO BIOMEDICO	Verificar encendido – apagado. Inspección del cable de poder. Limpieza interna y externa del equipo con sus accesorios. Limpieza de contactos tarjeta
	AUTOCLAVE	ESTERILIZACIÓN	307-0817	SEMESTRAL	JUNIO	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento, revisión de sistema eléctrico, panel de control, señales de activación, bloqueo de puerta (si procede), revisión de sistema hidráulico, neumático, corrección de fugas y revisión de válvulas y conectores.
	TERMOHIGRÓMETRO	ESTERILIZACIÓN	NO REGISTRA	SEMESTRAL	JUNIO	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Revisión de batería y estado de display. Limpieza general.
TERMÓMETRO	TOMA DE MUESTRAS	NO REGISTRA	SEMESTRAL	JUNIO	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Revisión de batería y estado de display. Limpieza general.	
TERMÓMETRO	TOMA DE MUESTRAS	NO REGISTRA	SEMESTRAL	JUNIO	EQUIPO BIOMEDICO	Verificación de funcionamiento. Revisión de batería y estado de display. Limpieza general.	